


安全扶手系列

浴廁好調整 | 安裝方便 | 可依不同尺寸訂製

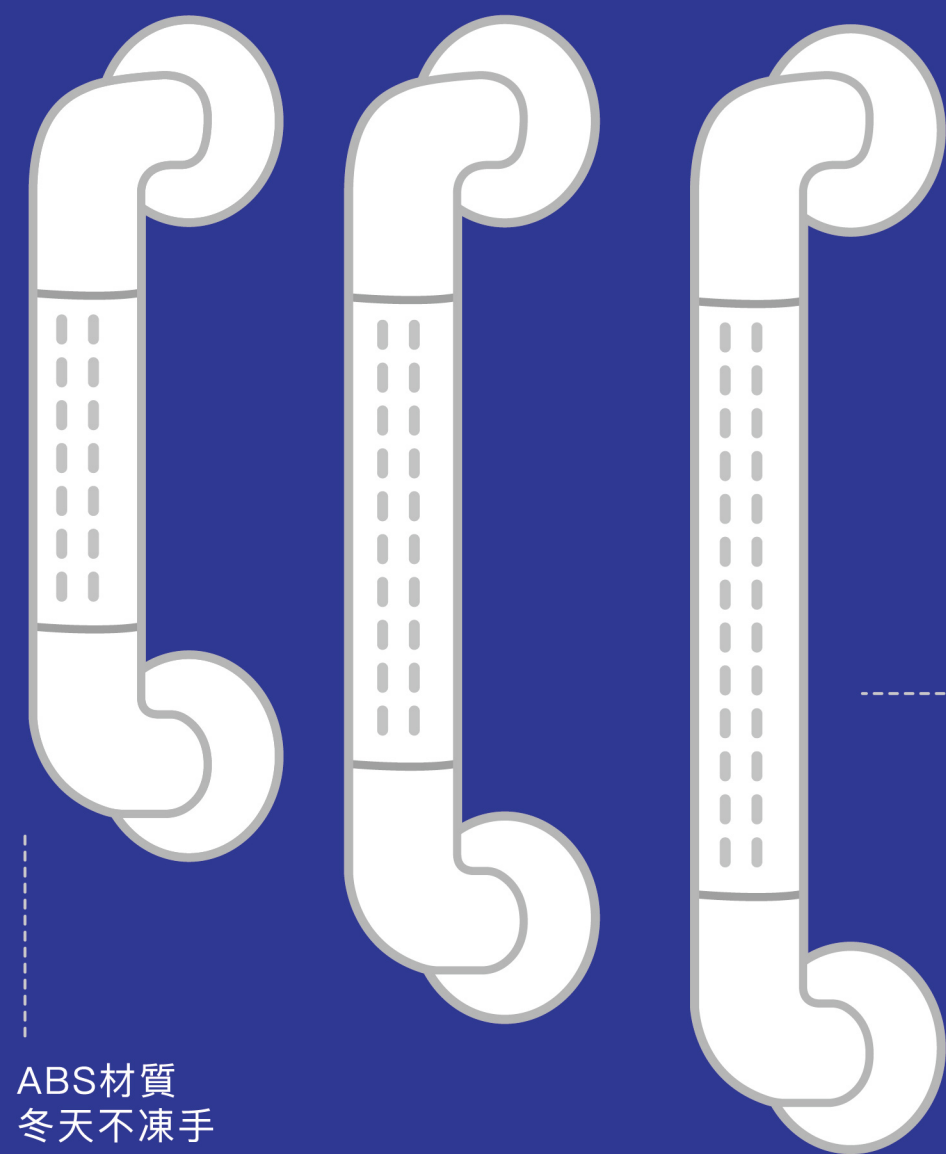


ABS材質
冬天不凍手



防滑顆粒



最高荷重

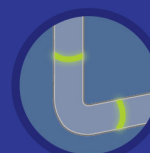

夜間螢光



冬天不凍手

表面凸起
防滑咬花

防滑，無障礙空間升級



模組化的通用設計，
適合全家大小的輔具，
守護家人安全最佳產品。

聯絡方式

店址：台中市烏日區中山路一段165號
Line帳號：@hardwarech
傳真號碼：(04)-2336-0077
電話客服：(04)-2336-0088



客戶服務 LINE




喬城五金官網



喬城五金臉書

安裝說明書


所需工具

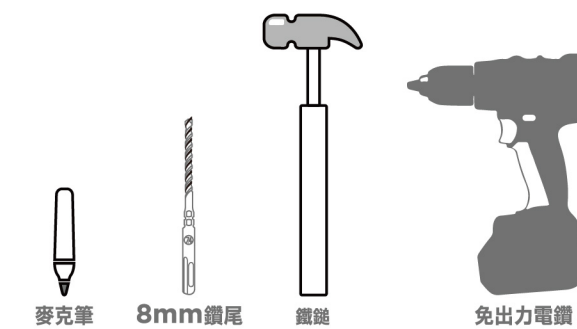


1. 把孔位標記於牆上。 (完成圖請參考背面)




2. 對著標記位子鑽孔， 需用8mm鑽尾， 鑽5cm深。

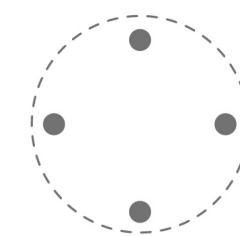


3. 清除粉塵及碎石。

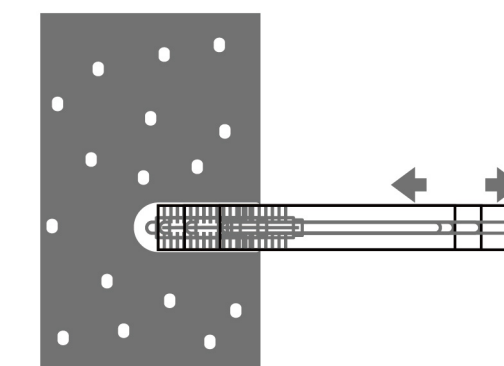


4. 把塑膠套管塞入孔內， 並用鐵槌敲平齊。

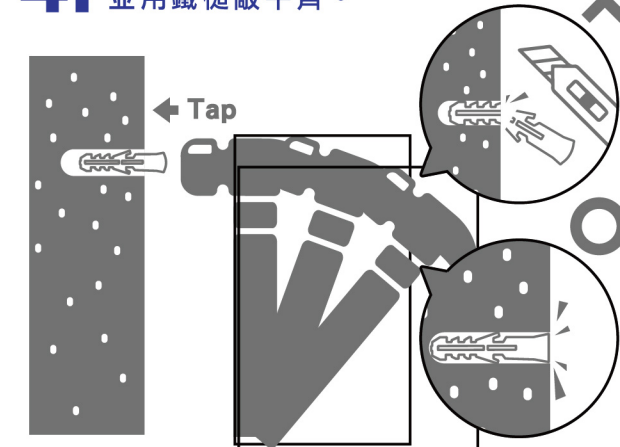

5. 把黑色墊片對準鎖孔， 並蓋上鎖環。

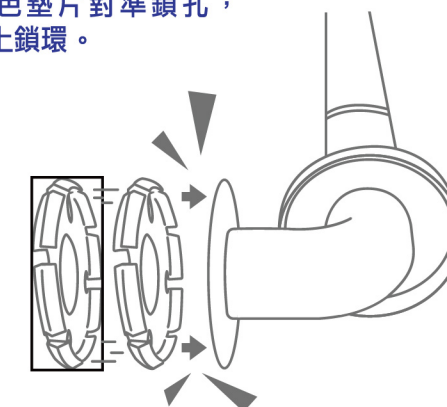


6. 把四根螺絲鎖上孔位， 牢固上鎖。

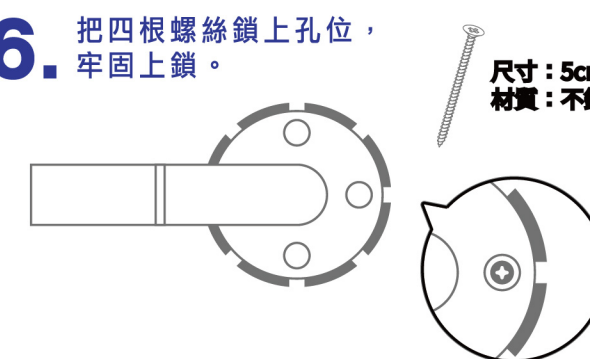


尺寸：5cm
材質：不銹鋼

T型. 由斜邊進孔位，對準塑膠 套管並90度垂直牆面鎖上。

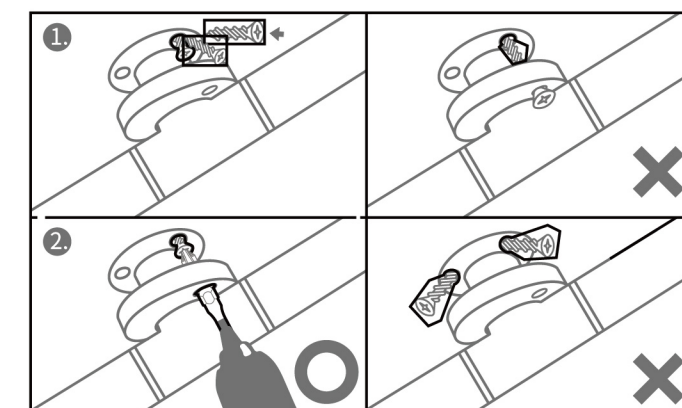


產品型號


CH-8801
U型上翻扶手
600 mm* 100 mm

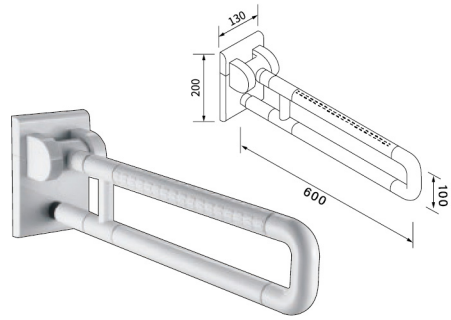


CH-8802
U型固定扶手
600 mm* 100 mm

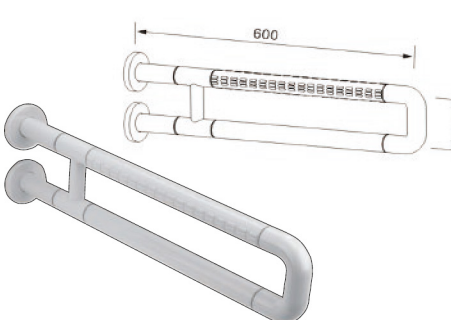


CH-8803
L型扶手
700 mm* 700 mm

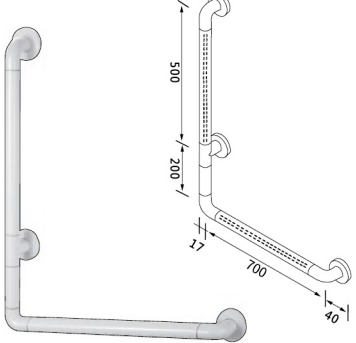


CH-8810
W型臉盆扶手
622 mm* 490 * 300 mm

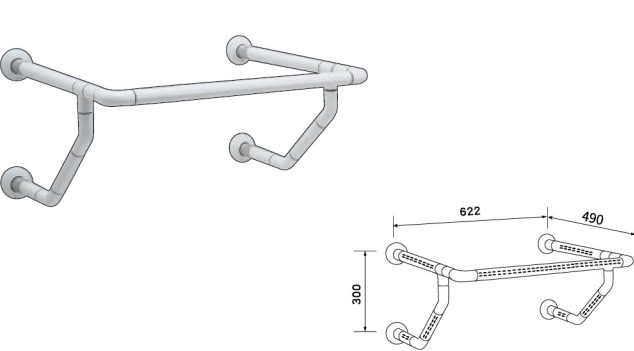


CH-8801-2
上翻扶手 NEW
700 * 126 mm

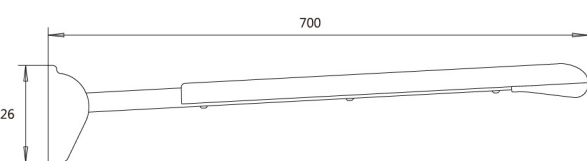


CH-8813-2
馬桶起身扶手 NEW
可調式 (依安裝需求調整)
扶手高度：640 — 700 mm
左右寬度：645 — 695 mm
整體深度：565 mm
可免打孔安裝

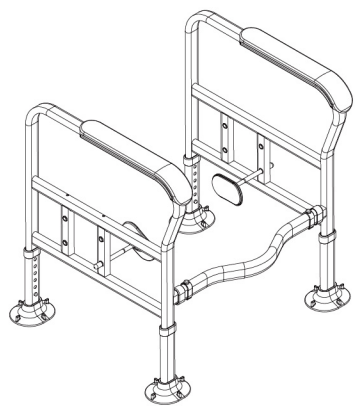


CH-8804
135度扶手
400 mm* 400 mm

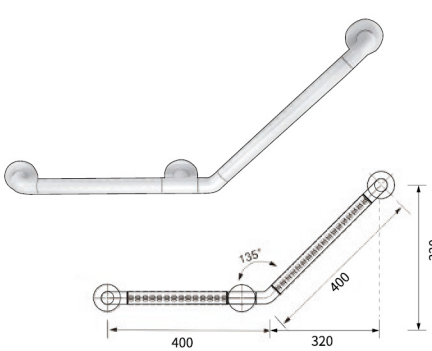


CH-8805 HOT
一字型扶手
350, 600, 800, 1200 mm

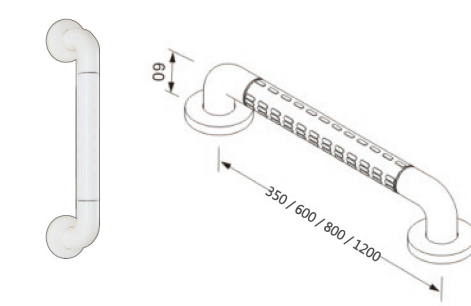


CH-8806
小便器扶手
600 mm* 380 mm

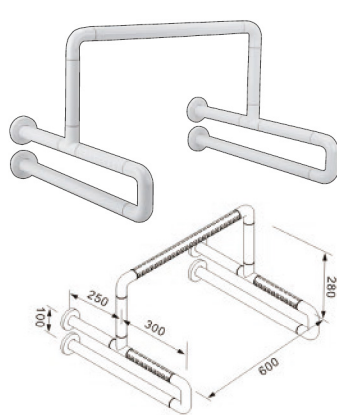

CH-8805T
T字型延長組
1000 mm

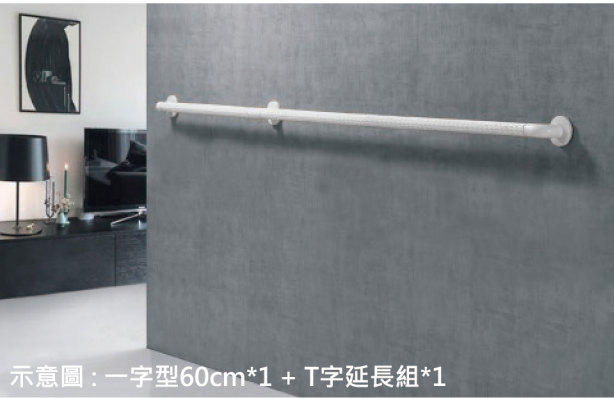


示意圖：一字型60cm*1 + T字延長組*1

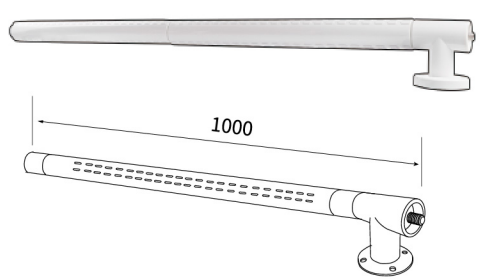


說明 延長尺寸參考

(數量) (尺寸) T字型 一字型	T字型*1	T字型*2	T字型*3	以此列推
35 cm	135 cm	235 cm	335 cm	
60 cm	160 cm	260 cm	360 cm	
80 cm	180 cm	280 cm	380 cm	
120 cm	220 cm	320 cm	420 cm	


CH-8807
I 型臉盆扶手
700 mm* 700 mm

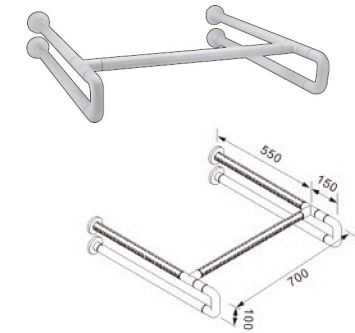


CH-8808
上翻浴室椅
315 mm* 380* 551 mm

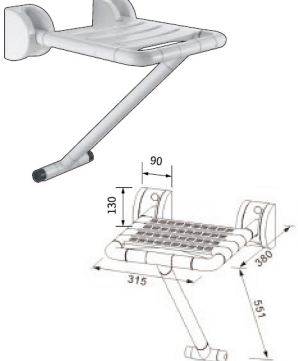

CH-8809
落地U型扶手
700 mm* 600 mm

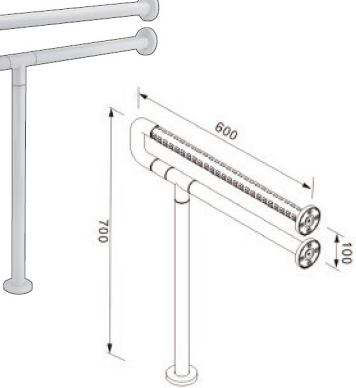



CH-8812
原木延長扶手
1500 mm * Ø40 mm

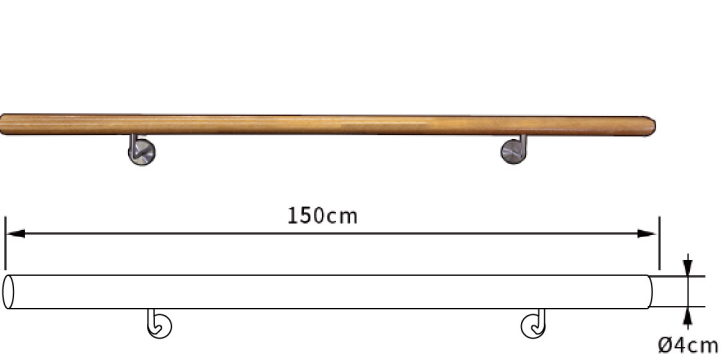

*可視需求使用尖尾螺絲連結延長扶手



CH-8814-2
床邊護檔加長 NEW
418 * 572 * 450 mm

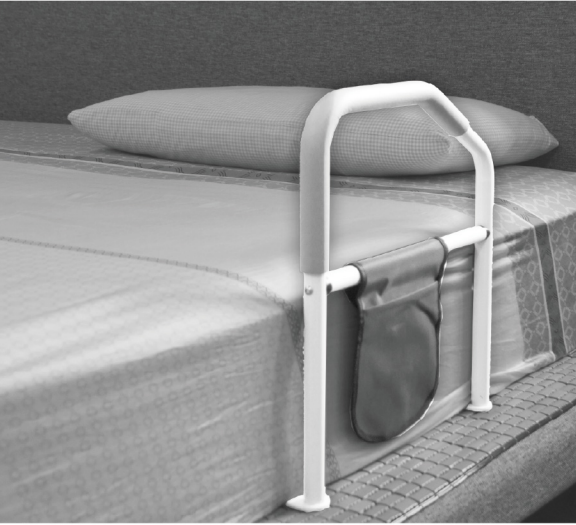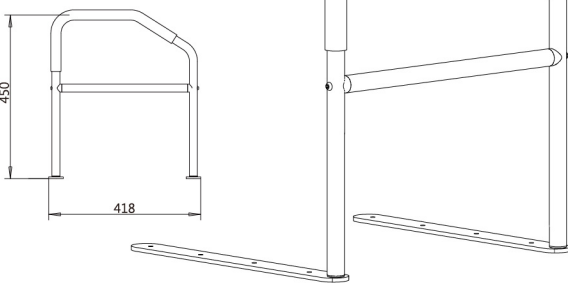

CH-8815
沙發起身扶手 NEW
665 * 495 * 665 mm

